



Guida rapida all'uso del ThinPrep® Pap Test™


Protocollo di utilizzo della Spatola/Spazzola endocervicale

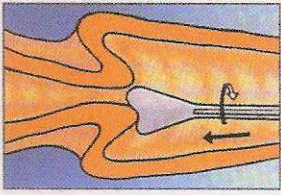


Prelevare un adeguato campione dalla portio vaginale utilizzando una spatola in *plastica*.

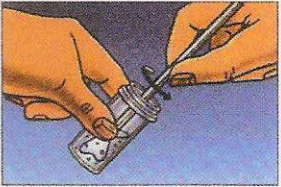

Sciacquare la spatola quanto prima possibile nella fiala di soluzione PreservCyt® ruotandola energicamente 10 volte. Gettare la spatola.

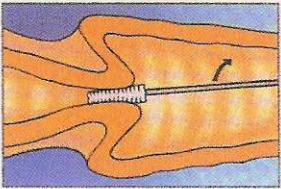


Prelevare un campione endocervicale adeguato con un dispositivo di prelievo endocervicale del tipo brush. Inserire il dispositivo all'interno del canale cervicale fino a quando risultano visibili solo le ultime setole. Ruotare lentamente 1/4 o 1/2 giro un'unica direzione. **NON RUOTARE ECCESSIVAMENTE.**

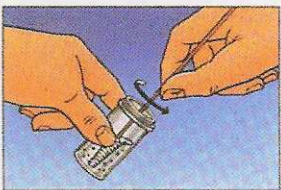

Sciacquare il dispositivo quanto prima possibile nella soluzione PreservCyt® ruotandolo 10 volte nella soluzione e al contempo premendolo contro le pareti della fiala PreservCyt®. Agitare energicamente il dispositivo in modo da rilasciare il materiale residuo. Gettare il dispositivo.




Chiudere il coperchio di modo che la tacca sul coperchio oltrepassi quella sulla fiala.

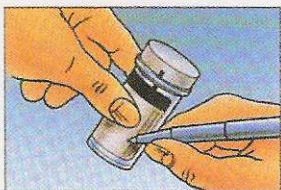


Annotare il nome e il numero identificativo della paziente sulla fiala.

Annotare i dati della paziente e la sua storia clinica sull'apposito modulo di richiesta per l'esame citologico.

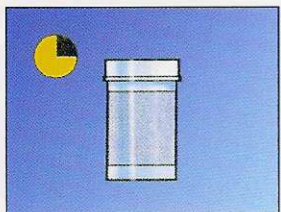

NOTA: nel caso in cui il campione debba essere processato immediatamente, lasciare il campione nella fiala di soluzione PreservCyt® almeno 15 minuti prima di procedere all'allestimento.

Nel caso in cui il campione venga inviato ad un laboratorio per l'elaborazione, procedere come indicato al punto seguente.

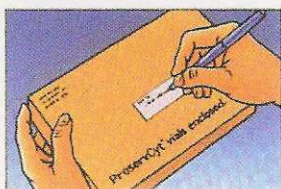

Inserire la fiala e il modulo di richiesta in un pacco per trasporto di campioni.