

ALLESTIMENTO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI CITO-ISTOLOGICI

CAMPIONE ISTOLOGICO

Il campione di tessuto deve essere inviato in formalina 10% neutra tamponata riportando sul contenitore il nome del paziente e la data del prelievo.

Il reperto deve esser accompagnato da una specifica documentazione riguardante:

- Il tipo di tessuto
- Il metodo di prelievo
- La sede del prelievo
- Il sospetto clinico
- I dati clinici completi del paziente
- Eventuali richieste particolari da porre all'isto-patologo

CAMPIONE CITOLOGICO

Campioni citologici posti già su vetrino devono essere trattati con appositi prodotti fissativi come il Citofix indicando sul vetrino il nome del paziente.

Campioni citologici in provetta devono essere posti in alcool con un rapporto di 1:1 riportando sul contenitore il nome del paziente e la data del prelievo.

Il reperto deve esser accompagnato da una specifica documentazione riguardante:

- Il metodo di prelievo
- La sede del prelievo
- Il sospetto clinico
- I dati clinici completi del paziente
- Eventuali richieste particolari da porre all'isto-patologo